



BEMÆRK: Opsætning kræver wi-fi- og e-mailadgang


Kom i gang

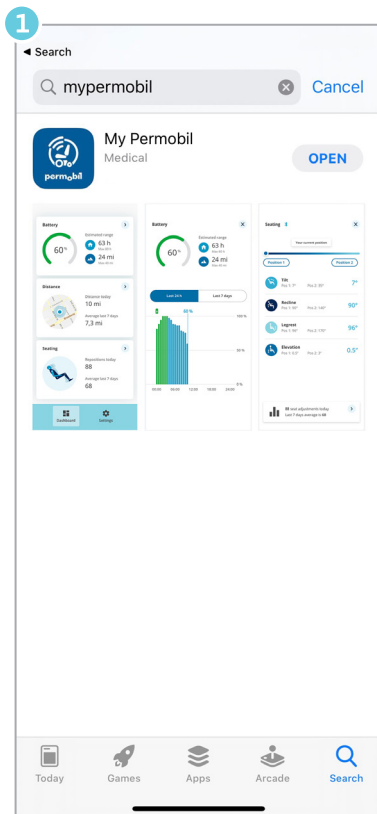


Download *MyPermobil* til din Android- eller Apple-telefon

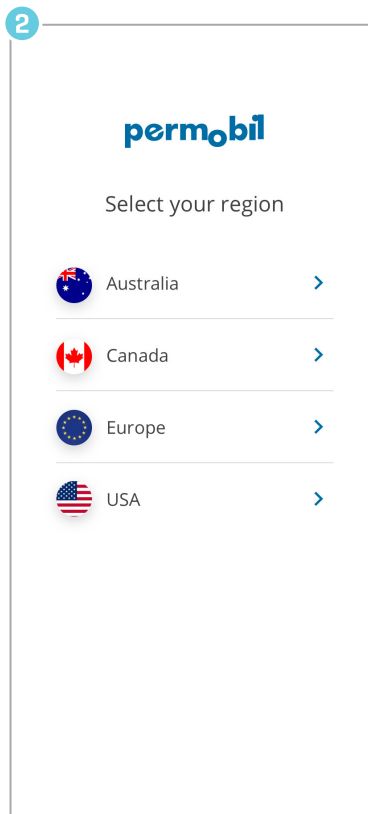

Vælg din region

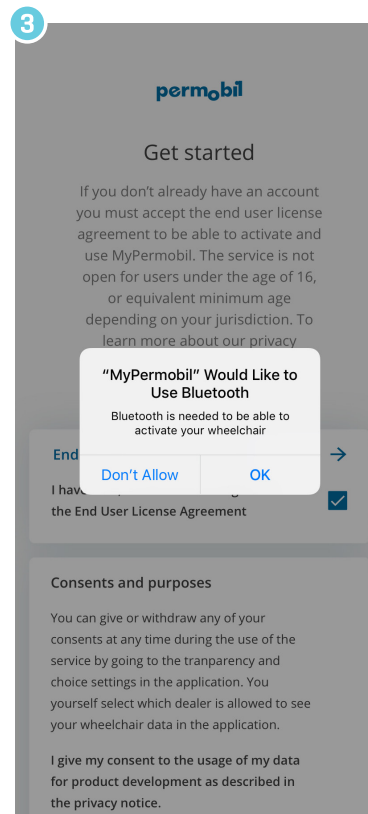

Accepter Bluetooth™-anmodning

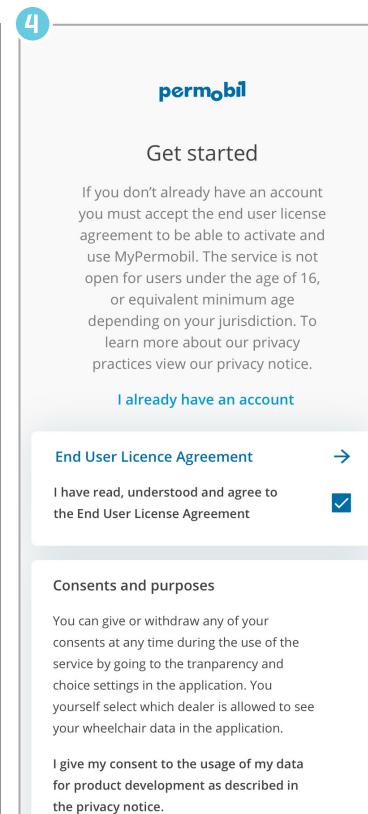

Accepter slutbrugerlicensaftale




MyPermobil




BEMÆRK: Opsætning kræver wi-fi- og e-mailadgang


Opret konto

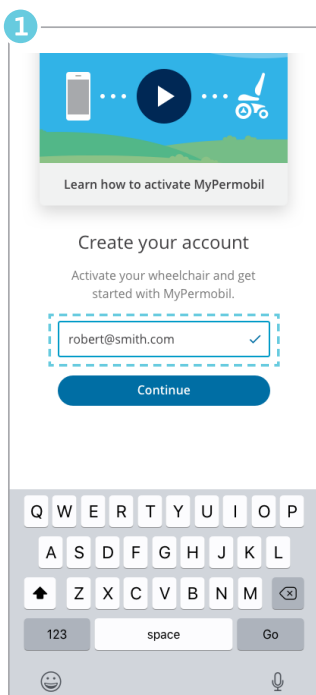

Indtast din e-mailadresse

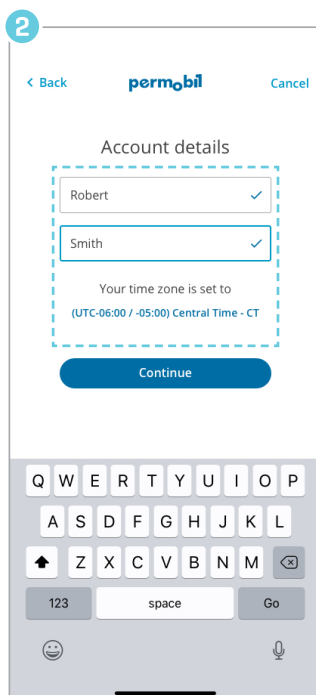


Indtast dit navn, og indstil din tidszone

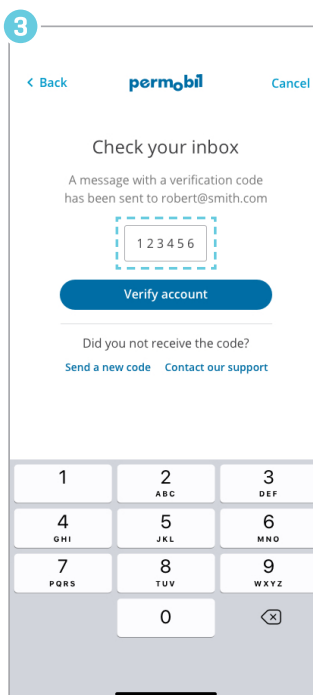


Indtast den kode, du har modtaget pr. e-mail, for at bekræfte din konto

Aktivér

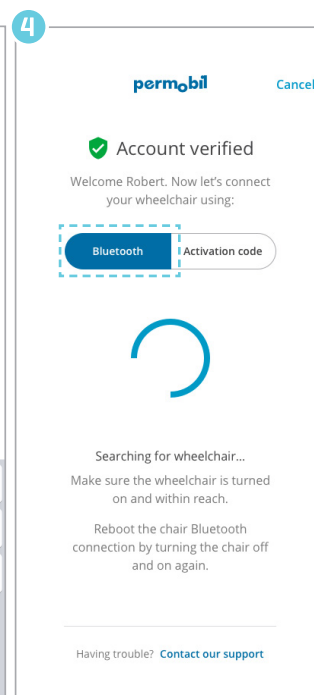


Vælg Bluetooth, og tænd din kørestol

Hvis din kørestol allerede er tændt, skal du slukke for den og tænde for den igen for at genstarte kørestolens Bluetooth-forbindelse

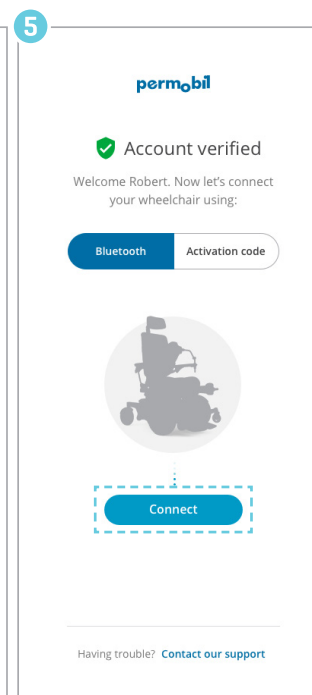

Klik på knappen Connect (Tilslut)

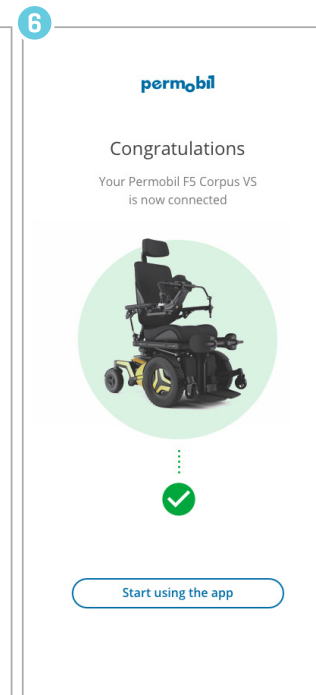

Du er tilsluttet!