

ROHO® Hybrid Select pude—Quick guide


BEMÆRK: Se brugervejledningen for komplet vejledning.

Kun til intern brug

Fjern betrækket, og lås ISOFLO® op



Ventil til oppumpning

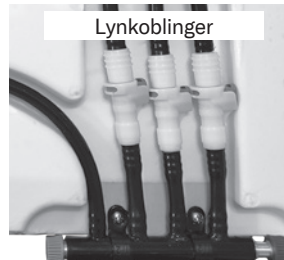

ISOFLO Memory Control


Brug en stabil overflade, f.eks. et bord, til at lyne betrækket op og åbne det. Vend produktet om, og sørg for, at lynkoblingerne er sikkert forbundet til ISOFLO.

Bemærk: Ved montering af lynkoblingerne: Slangerne kan fastgøres i vilkårlig rækkefølge.

2



Lås op
GRØN KNAP

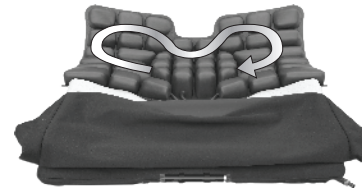

Sørg for, at ISOFLO er låst op. Se afsnittet "ISOFLO Memory Control" i brugervejledningen.

Bemærk: Når ISOFLO er låst op, strømmer luften frit gennem alle luftcellerne. Du kan ikke pumpe puden op, medmindre ISOFLO er låst op.


Atmosfærisk oppumpning

Bemærk: Sørg for, at der ikke er vægt på luftpuden, før du starter. Hvis personen sidder på puden, skal vedkommende forflyttes, før du begynder.

1

Åbn ventilen.

Bemærk: Drej mindst én fuld omdrejning for at åbne. Ventilen drejer frit, når den er åben. Du kan bruge håndpumpens mundstykke til at åbne ventilen.

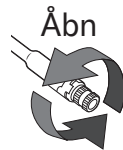

Åbn

2

Pump med håndpumpen, indtil alle luftcellerne føles faste.

Bemærk: Alle luftceller pumpes op på samme tid.



3

Fjern håndpumpen, og luk IKKE ventilen.

4

Lad luft slippe ud af ventilen. Lyt efter (eller hold en hånd foran ventilen) for at se, om luftstrømmen er stoppet.

5

Luk ventilen helt. Puden er nu pumpet op til atmosfærisk tryk.



Luk

ROHO® Hybrid Select pude—Quick guide


BEMÆRK: Se brugervejledningen for komplet vejledning.

Kun til intern brug

Overgangskontrol

1


Placer en hånd under personen, hvor luftcellerne møder skumgummiunderdelen (vist med den ovale form), og mærk overgangen fra luftpude til skum. Følg vejledningen nedenfor.

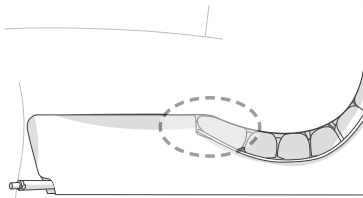

Korrekt oppumpning

Det føles JÆVNT, hvor luftcellerne møder skummet. Der er ingen buler eller kanter af overlappende luftceller og skum.


Sådan gør du: Udfør en nedsænkingskontrol som vist nedenfor.

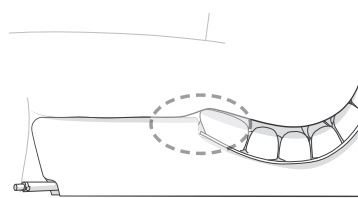

For meget luft i cellerne

Det føles som en bule eller en kant af luftceller, der ligger oven på skummet. Luftcellerne er for høje.

Sådan gør du: Luk lidt luft ud, og kontrollér igen. Gentag efter behov, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op. Udfør derefter en nedsænkingskontrol som vist nedenfor.

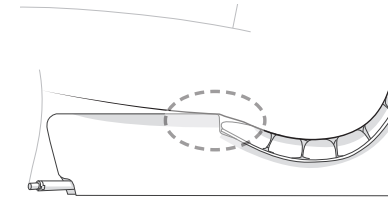

For lidt luft i cellerne

Det føles som en bule eller en kant af skum. Luftcellerne er ikke i samme højde som skummet.

Sådan gør du: Tilføj lidt luft, og kontrollér igen. Gentag efter behov, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op. Udfør derefter en nedsænkingskontrol som vist nedenfor.

Nedsænkingskontrol


1

Når luftcellerne er pumpet korrekt op for at sikre en jævn overgang fra luftceller til skum, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig luft (eller plads) under sædekuglerne.


Med halebensluftpuden:

Placer en hånd under de laveste knoglefremspring (sædekuglerne), og sørg for, at der er mindst 1,5 cm luft.

Tilføj eller fjern om nødvendigt en smule luft. Gentag, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op.

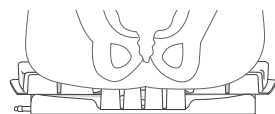

Korrekt oppumpning
(med halebensluftpuden)

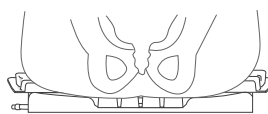

For lidt pumpet
(med halebensluftpuden)

Uden halebensluftpuden (option):

Placer en hånd under de laveste knoglefremspring (sædekuglerne), og kontrollér, at de ikke er i kontakt med skummet. Tilføj eller fjern om nødvendigt en smule luft. Gentag, indtil luftcellerne er pumpet korrekt op.



Korrekt oppumpning
(uden halebensluftpuden)



For lidt pumpet
(uden halebensluftpuden)