

Veiledning for lading

Din rullestol er utstyrt med vedlikeholdsfrie AGM-batterier fra Permobil. Det betyr at du må lade batteriene regelmessig – annet vedlikehold er ikke nødvendig. Den enkleste rutinen er å lade rullestolen hver kveld/natt etter at du er ferdig med å bruke den og den er parkert.

Slik lader du:

- Koble laderens kontakt til ladeuttaket i rullestolens joystick, panel eller eksterne ladeuttak.
- Koble deretter laderens støpsel til vegguttaket.
- Ladingen starter automatisk.

For best mulig resultat bør lading og oppbevaring skje i normal romtemperatur, ca. 20°C. Ved kaldere temperaturer kan ladingen ta lengre tid, og batteriets kapasitet reduseres – noe som kan gi kortere rekkevidde per lading.

Laderen styrer ladingen automatisk og trenger ikke overvåkes. Den skal ikke kobles til et uttak med tidsur.

Når ladingen er ferdig, lyser alle fire lampene på laderen. Du kan la laderen være tilkoblet til du skal bruke rullestolen igjen.

Når du avslutter ladingen; Koble først støpselet fra vegguttaket. Koble deretter ladekontakten fra rullestolen.

Lading bør normalt vare i minst 8 timer. Helt utladede batterier tar ca. 12 timer å lade fullt. Ikke avbryt ladingen før den er ferdig og alle fire lampene lyser

Hvis rullestolen sjelden eller aldri brukes så mye at batterinivået synker under 50 %, bør du en gang i uken kjøre rullestolen ekstra mye slik at batterinivået når det røde området før du lader.

