

Zusatzantrieb

SmartDrive MX2+



permobil

Zusatzantrieb per Knopfdruck

SmartDrive unterstützt Ihren aktiven Lebensstil. Der Antrieb bringt Ihnen zusätzliche Energie, die Sie normalerweise benötigen. Ein Knopfdruck, ein Klopfen oder eine Geste für den zusätzlichen Powerschub, wann und wo Sie ihn brauchen.

SmartDrive ist ein leichter elektrischer Zusatzantrieb für manuelle Rollstühle, mit dem Sie Steigungen, Rampen, dicke Teppiche und lange Strecken überwinden und im Grunde überall dort fahren können, wo das Antreiben schwer fällt.

Das Antreiben eines Rollstuhls belastet die Schultern, was sich zu einem ernsthaften Problem entwickeln kann. Mit dem SmartDrive müssen Sie nachweislich weniger antreiben und häufige Belastungen werden minimiert. Er schützt Ihre Schultern vor Abnutzung durch langfristiges, sich wiederholendes Antreiben und reduziert das Risiko des RSI-Syndroms (Repetitive-Strain-Injury-Syndrom) an Ellenbogen und Handgelenken.

Der SmartDrive ist einfach und intuitiv zu bedienen und mit der Steuerungsoption Ihrer Wahl gekoppelt: PushTracker E3, SwitchControl, SpeedControl Dial oder Apple Watch.



Leicht abnehmbar, daher ideal zu transportieren

Kompatibel mit fast allen manuellen Rollstühlen, seien es Starr- oder Faltrahmen

Verschiedene ergonomische Griffe zum schnellen Befestigen an zahlreichen Rollstuhlmodellen

Geringes Gewicht von nur 5,7 kg

Verschiedene Steuerungsoptionen, die Wahl liegt bei Ihnen

Dank OmniWheel-Design kann SmartDrive in jeder Position gestartet werden, sorgt stets für optimale Traktion und meistert Steigungen bis zu 17 %



SwitchControl

SwitchControl ist eine einfache Möglichkeit Ihren SmartDrive per Knopfdruck zu steuern. Sie können SwitchControl im Momentary-Modus oder im Latched-Modus verwenden und einen externen Schalter über einen optional erhältlichen Mono-Jack anschließen.

Momentary-Modus

Ihr SmartDrive bleibt aktiviert, solange Sie einen der Schalter gedrückt halten.

Latched-Modus


Halten Sie einen der Schalter gedrückt, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Wenn Sie anhalten möchten, drücken Sie einfach kurz auf den Schalter und halten Ihre Räder fest.

SwitchControl mit Mono-Jack-Option

Bedienen Sie SwitchControl mit jedem beliebigen externen Mono-Jack-Schalter, keine Programmierung erforderlich.

SpeedControl Dial

Ergonomisches Design für eine universelle Passform an allen manuellen Rollstühlen. Mit der einfachen Installation und den vorkonfigurierten Einstellungen des SpeedControl sind Sie in wenigen Minuten startklar.

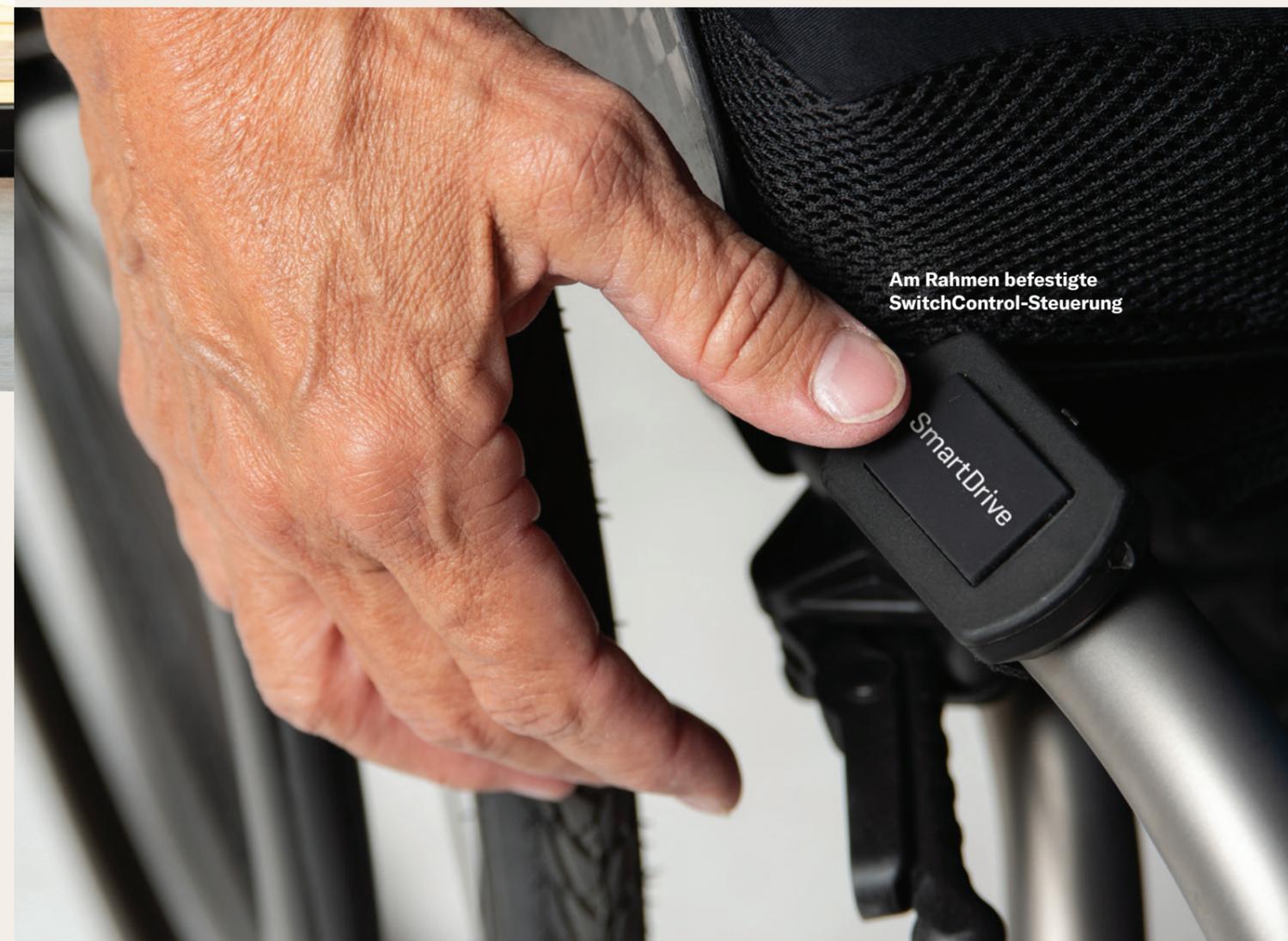



PushTracker E3

Der PushTracker E3 verfügt über einen neuen Prozessor und eine verbesserte Batterieleistung.

- Vorinstallierte Apps für eine einfache Einrichtung in wenigen Minuten
- Touchscreen-Technologie
- Längere Batterielebensdauer
- Langlebig und wasserdicht
- Reaktionsschneller und effizienter

Weitere Informationen



Apple Watch

Sie können nun die Apple Watch (ab Series 5) zur Steuerung Ihres SmartDrive MX2+ verwenden.

- Schnelle und einfache Einrichtung
- Behalten Sie Entfernungen und Ladezustand mit Ihrer Apple Watch im Blick
- Branchenführende Batterieleistung
- Kostenlos im App Store



Mehr Power, mehr Kontrolle

Mit der Steuerungsoption Ihrer Wahl	SpeedControl Dial	SwitchControl	SwitchControl Mono-Jack	PushTracker E3 Basic	PushTracker E3	Apple Watch
						
Bei Permobil erhältlich	✓	✓	✓	✓	✓	
Kabelgebundene Option	✓	✓	✓			
PushTracker				Vorinstalliert	Vollständige Smartwatch	Vollständige Smartwatch
Plug & Play	✓	✓	✓	✓		
Einrichtung in 5 Minuten	✓	✓	✓	✓		
Programmierbare Einstellungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kein Aufladen erforderlich	✓	✓	✓			
Funktioniert mit SpeedControl	✓			✓	✓	✓
Funktioniert mit SwitchControl		✓		✓	✓	✓
Funktioniert mit SwitchControl Mono-Jack			✓	✓	✓	✓
Kein WLAN erforderlich	✓	✓				
Geschwindigkeiten erhöhen oder verringern, ohne anzuhalten	✓					

