


## ROHO QUADTRO SELECT

Wir empfehlen, das Kissen auf Umgebungsdruck aufzupumpen. Diese einfache Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um das Kissen mit der empfohlenen Luftmenge zu füllen. Das Kissen bietet so bereits eine gute Druckentlastung und sorgt für Komfort.

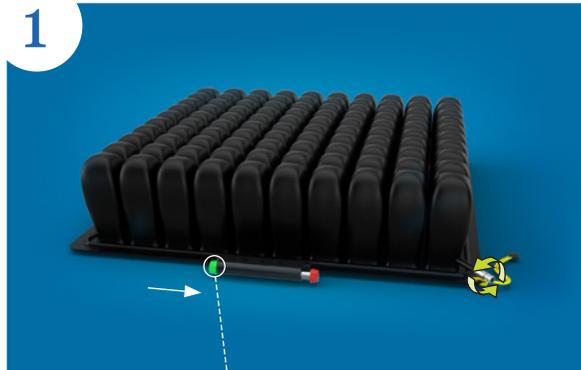

1 Drücken Sie den grünen Knopf und öffnen das Ventil.



2 Pumpen Sie das Kissen mit der Handpumpe auf, bis sich alle Luftzellen fest anfühlen.



3 Entfernen Sie die Pumpe. Schließen Sie das Ventil nicht. Lassen Sie Luft entweichen.



4 Hören Sie oder fühlen mit der Hand und stellen Sie sicher, dass keine Luft mehr entweicht.




5 Schließen Sie das Ventil.



6 Legen Sie das Kissen auf die Sitzfläche und setzen sich auf das Kissen.

## ROHO QUADTRO SELECT


Eine Handkontrolle sollte regelmäßig durchgeführt werden.

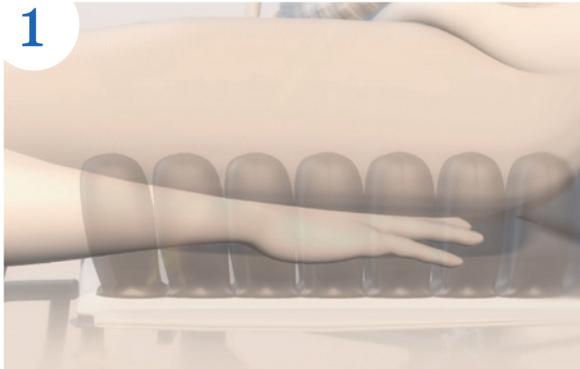


1 Schieben Sie eine Hand zwischen Kissen und Gesäß des Nutzers, bis Sie die Sitzbeinhöcker spüren.



2 Prüfen Sie die Luftmenge im Kissen durch Bewegen der Finger. Zwischen den Sitzbeinhöckern und der Unterseite des Kissens sollten 1,5–2,5 cm liegen.

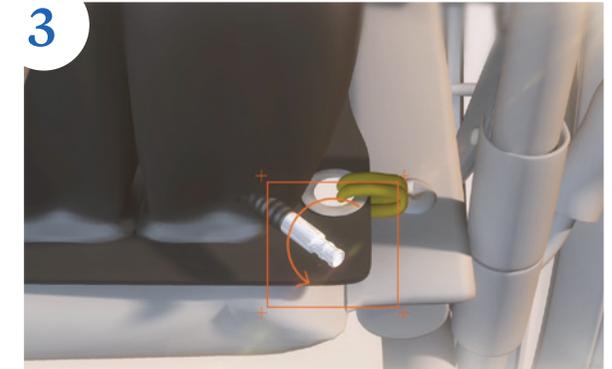

3 Lassen Sie bei Bedarf Luft entweichen oder geben Sie Luft mithilfe der mitgelieferten Pumpe hinzu, um ein optimales Einsinken und Umhüllen sicherzustellen.

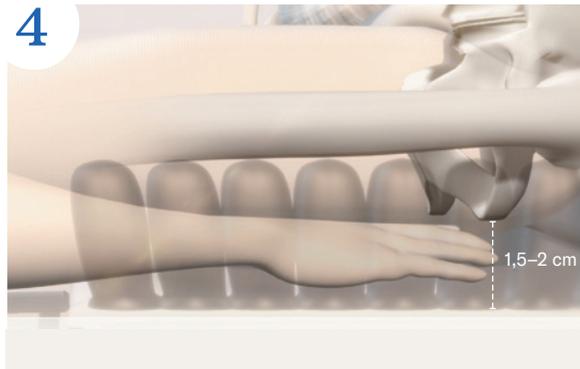

4 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Sitzbeinhöckern des Nutzers und der Unterseite des Kissens 1,5–2,5 cm beträgt.



Überprüfen Sie regelmäßig die Luftmenge im Kissen.



Verwenden Sie das ROHO-Kissen für ein ultimatives Sitzerlebnis.