

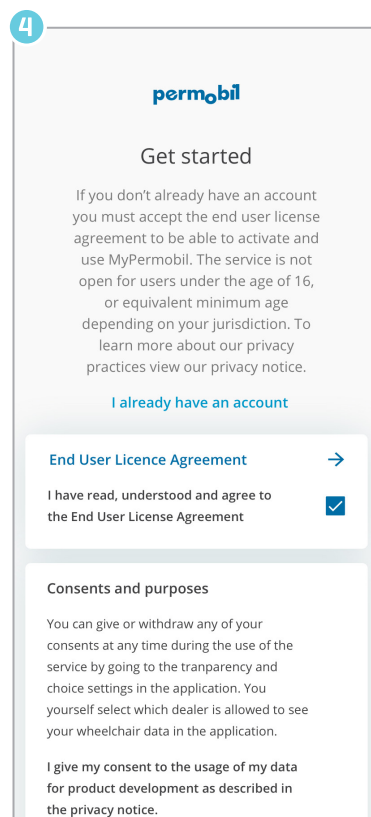
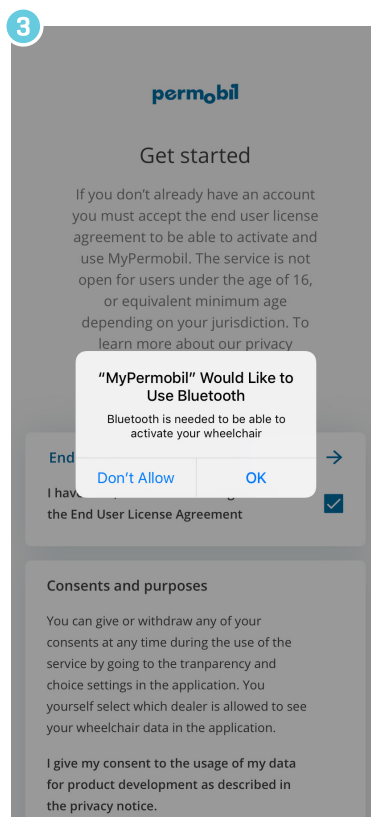


Wifi og e-post er nødvendig for å aktivere MyPermobil

Komme i gang

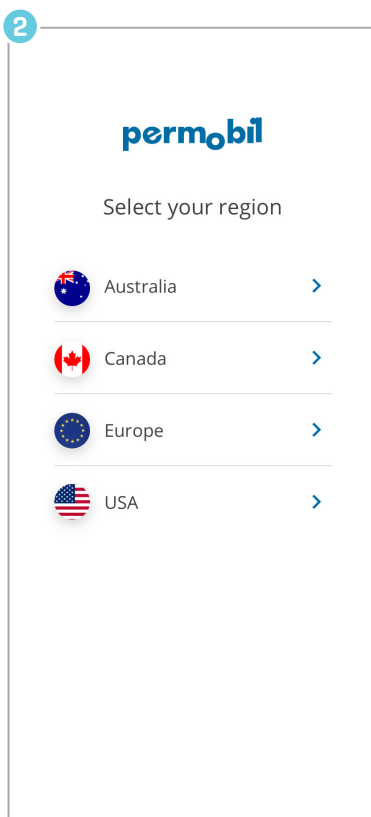

MyPermobil

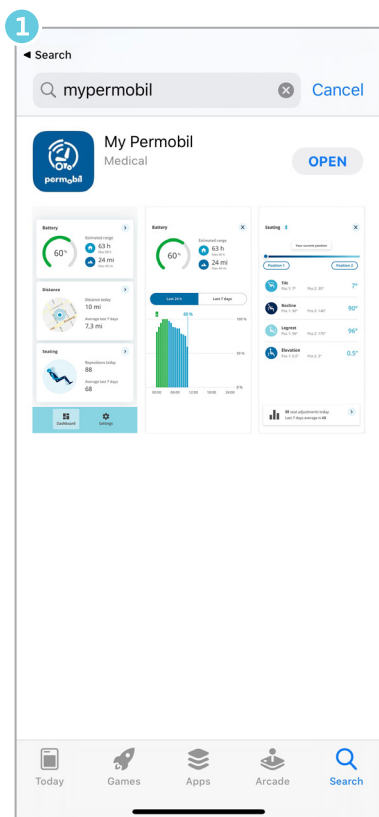

Last ned MyPermobil på din Android- eller Apple-telefon


Velg din region

Godta Bluetooth™-forespørsel


Godta lisensavtale for sluttbrukere

Wifi og e-post er nødvendig for å aktivere MyPermobil


Opprett konto

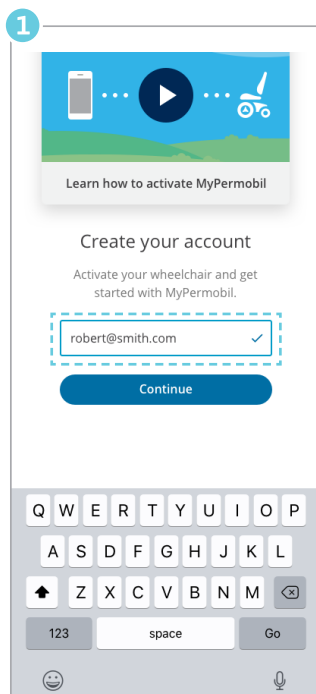

Skriv inn e-postadressen din

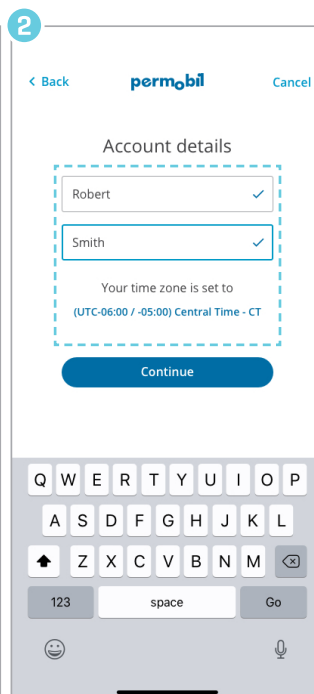


Skriv inn navnet ditt og angi tidssonen din

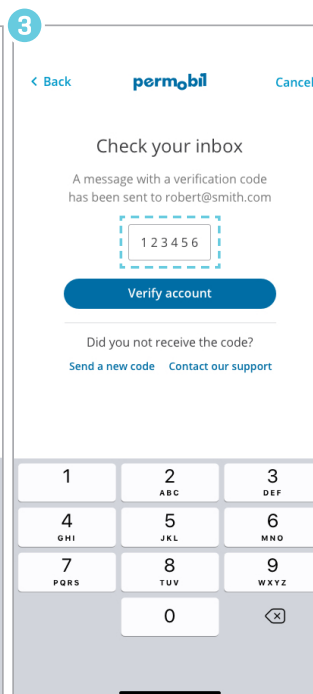


Skriv inn koden du mottok via e-post for å bekrefte kontoen din

Aktiver

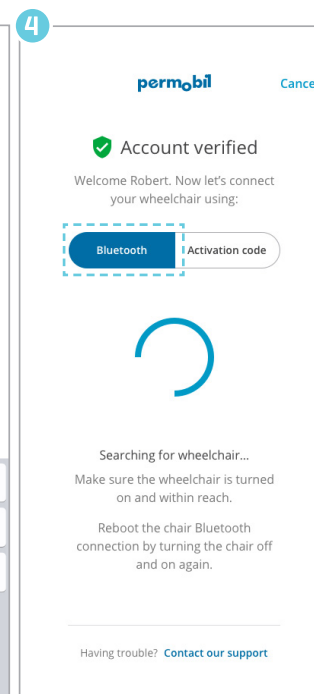


Velg Bluetooth og slå på rullestolen

Hvis stolen din allerede er på, slå den av og på igjen for å starte rullestolens Bluetooth-tilkobling på nytt

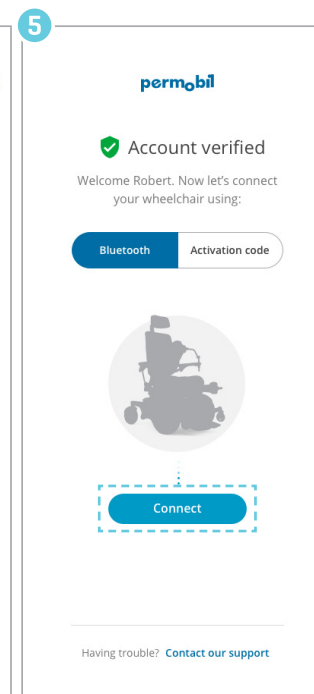

Klik på "Connect"

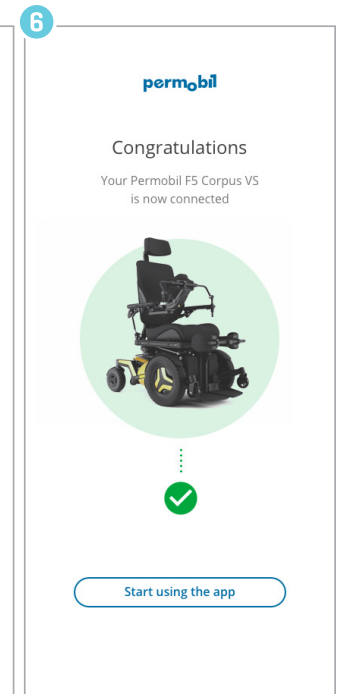

Du er tilkoblet!