

ROHO MOSAIC

Wir empfehlen, das Kissen auf Umgebungsdruck aufzupumpen. Diese einfache Anleitung führt Sie durch die notwendigen Schritte, um das Kissen mit der empfohlenen Luftmenge zu füllen. Das Kissen bietet so bereits eine gute Druckentlastung und sorgt für Komfort.



Öffnen Sie das Ventil.



Pumpen Sie das Kissen mit der Handpumpe auf, bis sich alle Luftzellen fest anfühlen.



Lassen Sie Luft aus dem Ventil entweichen.



Hören Sie oder fühlen mit der Hand und stellen Sie sicher, dass keine Luft mehr entweicht.



Schließen Sie das Ventil.



Legen Sie das Kissen mit den Luftkammern nach oben auf die Sitzfläche. Ziehen Sie den Bezug über das Kissen und setzen Sie sich auf das Kissen.