

Atmosfærisk trykk-innstilling ROHO® sitteputer*

Bruksanvisningen gjelder bare for følgende puter:
ROHO® Single Compartment (HØY, MID, LAV PROFIL)
ROHO® QUADTRO Select® Høyprofil
ROHO® ENHANCER®

⚠ ADVARSEL:
Må ikke brukes til:
ROHO® Enkammer med Sensor Ready®
Technology og Smart Check® by ROHO®

⚠ **VIKTIG!** - en kliniker med erfaring i sitte og posisjonering problemstillinger bør avgjøre om atmosfærisk trykk er egnet for brukeren. For alternativer innstillinger av rett luftmengde samt sikkerhets og vedlikeholds informasjon, henvises til bruksanvisningen levert sammen med puten og trekket.

⚠ **ADVARSEL!** - Ikke plasser vekt på puten når atmosfærisk trykk-innstilling pågår.

Atmosfærisk trykk-innstilling

1. QUADTRO Select: Press inn den grønne ISO FLO Memory Control før puten fylles med luft. (Fig. 1)
2. Åpne luftventil. (Fig. 2)
3. Pump inn luft med vedlagte håndpumpe til alle celler er godt fylt med luft.
4. Fjern håndpumpen og la ventilen stå i åpen posisjon.
5. La ventilen stå åpen til luften har strømmet ut.
Forslag: hør etter eller plasser hånden foran ventilen for å kjenn om all luft har strømmet ut.
6. Lukk ventilen. (Fig. 3)

Fig. 1
ISO FLO® Memory Control
QUADTRO Select® Cushions



Fig. 2


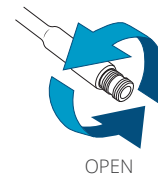



Fig. 3

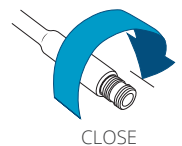

Fullføre trykk-innstilling

1. Plasser puten i stolen med cellene vendt oppover.
2. Monter putetrekket.
3. La bruker sette seg på puten.
4. Utfør en håndsjekk for kontroll av riktig luftmengde (Fig. 4)

Fig. 4

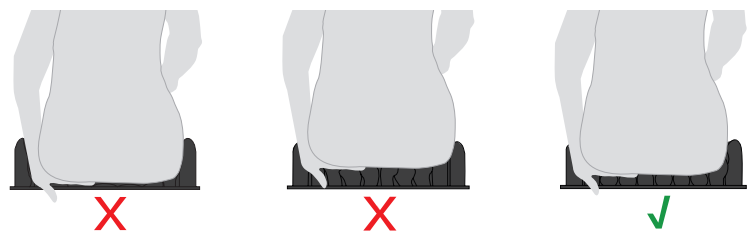

⚠ **VIKTIG!** Select og ENHANCER puter:

- For puter med flere luftventiler og luftkamre, må alle steg utføres for hvert kammer.
- For Select og ENHANCER puter kan det være nødvendig med ekstra justering og posisjonering, se vedlagte bruksanvisning.

⚠ **ADVARSEL!** - Kontroller alltid luftmengden etter atmosfærisk trykk-innstilling. Utfør en håndsjekk for å bekrefte at det ikke er kontakt mellom bruker og setebunn, se putens vedlagte bruksanvisning.