

ROHO® Hybrid Select kussen—Snelle installatie

LET OP: Zie de gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

Verwijder de cover en ontgrendel de ISOFLO®



Ventiel




ISOFLO Memory Control

Gebruik een stabiel oppervlak, zoals een tafel, om de cover open te ritsen. Draai het product om en controleer of de snelkoppelingen goed zijn aangesloten op de ISOFLO.

Opmerking: Bij het bevestigen van de snelkoppelingen: De slangen kunnen in elke gewenste volgorde worden bevestigd.

2

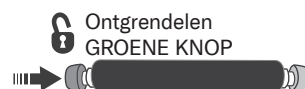

Zorg ervoor dat de ISOFLO ontgrendeld is. Zie de sectie "ISOFLO Memory Control" in de gebruikershandleiding.

Opmerking: Wanneer de ISOFLO is ontgrendeld, stroomt de lucht vrij door alle luchtcellen. U kunt het kussen pas opblazen als de ISOFLO ontgrendeld is.

Atmosferische inflatie

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen gewicht op het luchtkussen zit voordat u begint. Als de persoon zich op het kussen bevindt, moet u de persoon van het kussen afhaken voordat u begint.

1

Open het ventiel.

Let op: Om het ventiel te openen, draait u ten minste één volledige slag. Het ventiel draait vrij rond wanneer het open staat. U kunt het ventiel openen met het mondstuk van de handpomp.



Openen

2

Vul met de handpomp totdat alle luchtcellen stevig aanvoelen.

Opmerking: Alle luchtcellen worden tegelijkertijd opgeblazen.



3

Verwijder de handpomp en sluit het ventiel NIET.

4

Laat lucht uit het ventiel ontsnappen. Luister (of plaats uw hand voor het ventiel) om te zien of de luchtstroom is gestopt.

5

Sluit het ventiel volledig. Het kussen is nu opgeblazen tot atmosferische druk.



Sluiten


ROHO® Hybrid Select Kussen—Snelle installatie

LET OP: Zie de gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

Overgangscontrole

1


Plaats een hand onder de persoon, waar de luchtcellen de schuimbasis raken (aangegeven door de ovale vorm) en voel de overgang van luchtkussen naar schuim. Volg de onderstaande instructies.

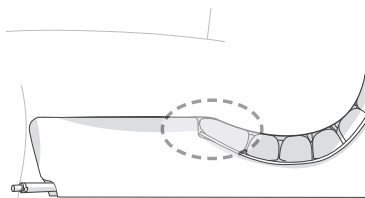

Correct opgeblazen

Het voelt VLAK aan waar de luchtcellen het schuim raken. Er is geen hobbel of rand van overlappende luchtcellen en schuim.


Wat te doen: Voer vervolgens een handcheck uit zoals hieronder weergegeven.

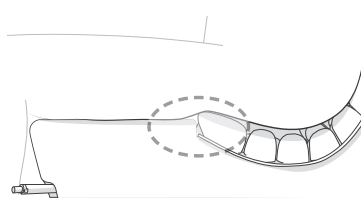

Te veel lucht in de cellen

Het voelt als een hobbel of rand van luchtcellen die bovenop het schuim liggen. De luchtcellen zijn te hoog.

Wat te doen: Verwijder een kleine hoeveelheid lucht en controleer opnieuw. Herhaal dit zo nodig totdat de luchtcellen goed zijn opgeblazen. Voer vervolgens een handcheck uit, zoals hieronder weergegeven.

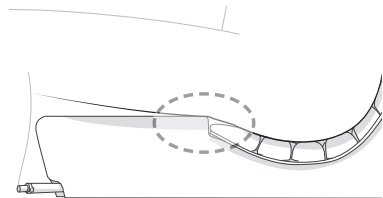

Niet genoeg lucht in de cellen

Het voelt als een hobbel of rand van schuim. De luchtcellen liggen niet gelijk met het schuim.


Wat te doen: Voeg een kleine hoeveelheid lucht toe en controleer opnieuw. Herhaal dit zo nodig totdat de luchtcellen goed zijn opgeblazen. Voer vervolgens een handcheck uit, zoals hieronder weergegeven.

Handcheck uitvoeren


1

Nadat de luchtcellen goed zijn opgeblazen om te zorgen voor een vlakke overgang van luchtcellen naar schuim, controleert u of er voldoende lucht (of ruimte) onder de IT's zit.

Met de IT Air Pad: Plaats een hand onder de laagste botuitsteeksels (IT's) en zorg ervoor dat er minstens 1,5 cm lucht is. Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid lucht toe of verwijder deze. Herhaal dit totdat de luchtcellen goed zijn opgeblazen.

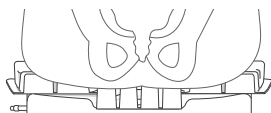

Correct opgeblazen
(met de IT Air Pad)

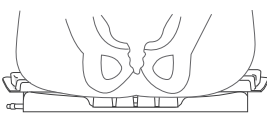

Onvoldoende opgeblazen
(met de IT Air Pad)

Zonder de IT Air Pad (ontladingsoptie): Plaats een hand onder de laagste botuitsteeksels (IT's) en zorg ervoor dat de IT's niet in contact komen met het schuim. Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid lucht toe of verwijder deze. Herhaal dit totdat de luchtcellen goed zijn opgeblazen.



Correct opgeblazen
(zonder de IT Air Pad)



Onvoldoende opgeblazen
(zonder de IT Air Pad)